

SURGIPLASTER jest materiałem do stymulowanej regeneracji kości. Przestrzeganie kilku prostych procedur pozwala na jego prawidłowe wykorzystanie i uzyskanie przewidywalnych klinicznych wyników.

OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera:

P 30: 1 butelka zawierająca 2 g zwartych mikrogranulek hemihydratu siarczanu wapnia, porowatych ale bez żadnych ostrych powierzchni, 1 buteleczka zawierająca 400 mg hemihydratu siarczanu wapnia w postaci proszku, 1 buteleczka zawierająca 1ml płynu REGULAR oraz 1 buteleczka z 1 ml płynu FAST. Ponadto takie akcesoria jak: 2 mieszadełka, kroplomierz i 1 szpachtułka.

G 170: 1 buteleczka zawierająca 2 g siarczanu wapnia w postaci porowatych granulek, zwartych i bez ostrych powierzchni, 1 buteleczka z 400 mg hemihydratu siarczanu wapnia w proszku, 1 buteleczka z 1 ml płynu RERULAR oraz 1 buteleczka z 1 ml płynu FAST. Akcesoria: 2 mieszadełka, 1 kroplomierz i 1 szpachtułka.

SINUS: 1 strzykawka z 2,5 g siarczanu wapnia w postaci porowatych granulek, zwartych i bez żadnych ostrych powierzchni.

WSKAZANIA

CHIRURGIA

- Wypełnianie zębodołów po ekstrakcjach
- Dehiscencje
- Usunięcie zębów trzecich trzonowych
- Utrzymaacz przestrzeni użyty z membraną
- Jako łącznik w przeszczepach kości
- Korekcja dehiscencji i fenestracji

PERIODONTOLOGIA

- Do wad międzykostnych i ubytków

ENDODONZJA

- W chirurgii periradikularnej i apikalnej
- Jako macierz w perforacjach radikularnych (wciskając preparat poprzez perforacje przed definitywnym uszczelnieniem odpowiednim materiałem)
- Przy apexach otwartych (jest wyciągany przez apex a następnie kanał zostaje przygotowany i zamknięty)

IMPLANTOLOGIA

- Periimplantitis
- Nieznaczne podnoszenie dna zatoki szczękowej
- Większe podnoszenie dna zatoki szczękowej
- Split crest
- W zabiegach powiększenia średnicy kości
- Przy implantach natychmiastowych

INSTRUKCJE

NIEZBĘDNE POMOCE: * Pincety ze stopem * Sterylne tampony z gazy TNT

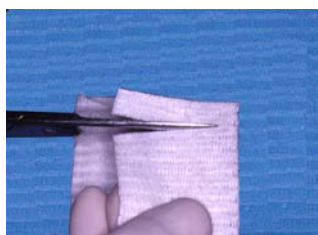
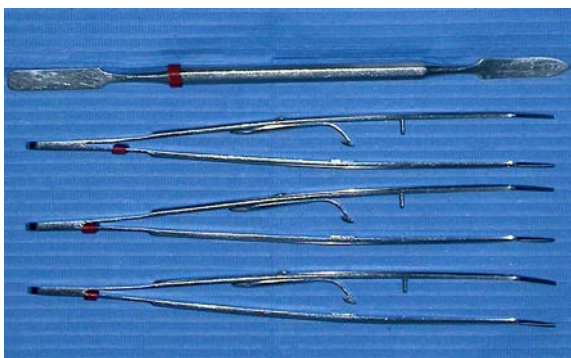


Fig. 1

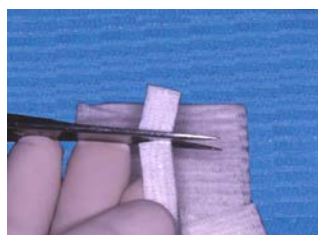


Fig. 2

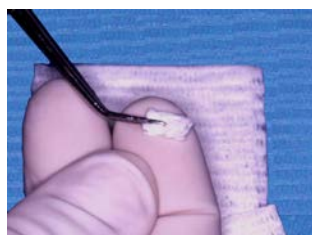


Fig. 3



Fig. 4

MIESZANIE I APLIKACJA: technika nakładania

P30:

Wsyp niezbędną ilość granulek do potrzeb regeneracyjnych do małej tacki mieszalnikowej znajdującej się w opakowaniu i zamknij szczelnie butelkę z pozostałym materiałem. Przy zetknięciu się z powietrzem i wilgocią hemihydrat siarczanu wapnia przemienia się w dehydrat tracąc wiele jego właściwości terapeutycznych. Używając kroplomierza pobierz nieco płynu REGULAR z buteleczki. Przesyp granulki do drugiej tacki i mieszaj z nieznaczną ilością płynu do chwili otrzymania mieszanki jak "mokry piasek" i mieszaj dalej aż do uzyskania gęstej, śmietankowej konsystencji. W czasie mieszania mogą być dodawane nieznaczne ilości proszku lub płynu dla poprawienia konsystencji lub przy nadmiarze płynu, można go usunąć suchą sterylną gazą TNT.

Zaleca się tamponowanie miejsca zabiegu sterylną gazą w celu kontrolowania ewentualnego krwawienia. Używając szpachtułki wprowadź do jamy pierwszą porcję przygotowanej mieszanki, ugniatając ją kawałkiem sterylnej gazy TNT (rys.1-4) umieszczonej na pinsecie ze stopem. Ta pierwsza warstwa posiada mechaniczny, hemostatyczny wpływ. Kontynuuj wypełnianie ubytku materiałem dodatkowym, nakładając go warstwami grubymi 2-3 mm, przy umiarkowanym docisku każdej warstwy, co ułatwi ich szczelne przyleganie. Ostatnia warstwa musi przepęśniać ubytek i być tamponowana gazą sterylną TNT zwilżoną płynem FAST co przyspiesza stwardnienie.



G170:

Wsyp niezbędną ilość granulek do potrzeb regeneracyjnych do małej tacki mieszalnikowej znajdującej się w opakowaniu i zamknij szczelnie butelkę z resztą materiału. W kontakcie z powietrzem i wilgocią hemihydrat siarczanu wapnia przemienia się w dehydrat tracąc wiele jego właściwości terapeutycznych.

Używając kroplomierza pobierz pewną ilość płynu REGULAR z buteleczki. W celu jak najlepszego pozycjonowania materiału w miejscu zabiegu, musi on być zwilżony płynem REGULAR i wymieszany szpachtułką dla ułatwienia konsystencji. Dzięki temu, że 25% materiału to hemihydrat siarczanu wapnia, granulki przylegają do siebie i mogą być łatwo nakładane szpachtułką w miejscu zabiegu. W celu uzyskania bardziej zwartej mieszanki można dodawać proszku z buteleczki znajdującej się w opakowaniu. Na górną warstwę granulek można nałożyć warstwę P30 (mieszanie i aplikacja P30) lub membranę regeneracyjną.



SINUS:

Szczególnie zalecany do mniejszego i większego podnoszenia dna zatoki szczękowej poprzez zębodół. Po uzyskaniu dostępu do zatoki szczękowej, dochyl strzykawkę do jamy odbiorczej, naciskając tłoczek strzykawki w celu wyciśnięcia preparatu. Aby nie pozostawić wolnych przestrzeni, nakładaj materiał ugniatając go kawałeczkiem sterylnej gazy (rys.1-4) nałożonej na pincetę ze stopem. Zakończ wypełnianie jamy materiałem dodatkowym. Jako ostatnią warstwę nałóż P30 by zapobiec wypadaniu granulek w czasie oddychania.



OSTRZEŻENIE: Produkt jest przeznaczony do jednorazowego użytku. – Sterylizowany promieniami Gamma (25 kGy). – **Nie może być ponownie sterylizowany.** Jeśli wskaźnik sterilności nie jest koloru czerwonego – nie stosuj preparatu.

Jak postanowiono w Europejskiej Dyrektywie 93/42 za zlokalizowanie preparatu jest odpowiedzialny lekarz, co oznacza, że musi on być w stanie zlokalizować pacjenta, któremu go poda. Zaleca się również dołączanie do akt pacjenta etykiety preparatu.

PRZECIWWSKAZANIA: Nie ma ogólnych przeciwwskazań stosowania **SURGIPLASTER** z wyjątkiem pacjentów wykazujących nietolerancję lub szczególnie uczulonych na niektóre komponenty. Natomiast wszystkie ogólne przeciwwskazania, związane z chirurgią oralną i szczękowo-twarzową pozostają w mocy. Stosowanie tego preparatu jest przeciwwskazane przy ostrych względnie chronicznych infekcjach miejsc zabiegowych, podczas leczenia lekami immunosupresyjnymi oraz immunodepresyjnymi pacjentów.

EFEKTY UBOCZNE: może powodować obrzęk w miejscu implantu u szczególnie predysponowanych osobników.

OSTRZEŻENIA I PRZECHOWYWANIE:

- Nie należy używać po upływie daty ważności podanej na opakowaniu
- Preparat może być przechowywany w temperaturze pokojowej (5-30°C).
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci

Producent: Ghimas S.p.A. - Via Cimarosa, 85 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Italia
- Tel. 051-575353 Fax 051-575568 - www.ghimas.com - e-mail: ghimas@ghimas.it

Produkt został wytworzony do stosowania w stomatologii i musi być stosowany w sposób opisany w informacji. Producent wyrzeka się jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody lub krzywdy wyrządzone przez niewłaściwe stosowanie wyrobu. Użytkownik jest odpowiedzialny osobiście za zapewnienie by produkt był przydatny do zamierzonych celów, zwłaszcza jeśli takie zastosowania nie są podane w opisanej informacji. Informacja stosowania została napisana dnia: 20/09/2007