

Fasi di lavorazione per cementare un perno	Cementazione tradizionale tecnica Total Etch	Cementazione adesiva Cement-One
1 Preparazione del canale	SI	SI
2 Mordenzare con acido fosforico	SI	NO
3 Sciacquare abbondantemente	SI	NO
4 Asciugare con cura	SI	NO
5 Miscelare Primer / Bonding e Attivatore	SI	NO
6 Applicare il Primer/Bonding miscelato con l'Attivatore	SI	NO
7 Asciugare il Primer/bonding con leggero getto d'aria	SI	NO
8 Applicare il cemento nel canale	SI	SI
9 Posizionare il perno nella preparazione	SI	SI
10 Rimuovere il materiale in eccesso	SI	SI
11 Fotopolimerizzare	SI	Fase opzionale
12 Procedere alla ricostruzione del moncone	SI	SI